

elmex®



Switch off



ÉLIMINEZ LA SENSIBILITÉ DENTAIRE DANS VOTRE CABINET AVEC elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL



NOUVEAU



**Occlusion tubulaire à 100 %
après une seule application*¹**



**Pénètre profondément
dans les tubuli²**



Application rapide et simple

50 doses unitaires par boîte

À utiliser :

- ✓ Avant un blanchiment dentaire professionnel
- ✓ Après un détartrage professionnel ou un traitement parodontal
- ✓ Pour les patient-e-s présentant une forte hypersensibilité



Transparent, prend
la couleur naturelle de
l'émail lors du séchage




Excellent goût de
framboise

**PÉNÈTRE
PROFONDÉMENT
DANS LES TUBULI²**

**Occlusion
tubulaire à
100 %
après une seule
application*¹**

DENTINE :
ZONE NON TRAITÉE

DENTINE :
ZONE TRAITÉE

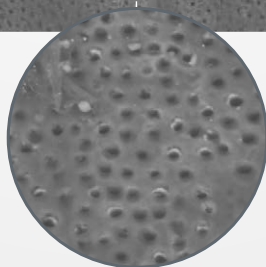

**Pénètre profondément
dans les tubuli²**

VERNIS FLUORÉ POUR LE TRAITEMENT DES DENTS HYPERSENSIBLES

Dose unitaire



1

Séchage

Sécher délicatement la surface dentaire avec de la gaze ou de l'air.



2

Mélanger

Remuer brièvement le vernis.



3

Application

Appliquer une couche fine et homogène sur les dents.



4

Essuyer

Essuyer le pinceau avec une compresse de gaze avant de le replonger, afin qu'il ne sèche pas.



5

Résultat final

Prend, lors du séchage, la couleur naturelle des dents.

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL : DES SOLUTIONS POUR TOUS LES MOMENTS OÙ UNE SENSIBILITÉ À LA DOULEUR PEUT SURVENIR



Vernis fluoré



Dans votre cabinet

à la maison



Utilisez le vernis fluoré elmx® SENSITIVE PROFESSIONAL Duraphat® et distribuez des échantillons de dentifrice elmx® SENSITIVE PROFESSIONAL pour l'utilisation quotidienne à domicile

SCANNEZ ou VISITEZ
shop.colgateprofessional.ch/fr-ch



* Étude in vitro, image confocale après 1 application.

1. Ultradent™1 Données internes. Rapport WO#4422, 2018.

2. Ultradent™ Données internes. Report 01780, 2020.